



Collirio Alfa LUBRIFICANTE E UMETTANTE

Gel oftalmico lubrificante e umettante

0,2 di Carbomer

COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL è un gel oftalmico lubrificante e umettante contenente lo 0,2% di Carbomer.

COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL è utile per alleviare i sintomi della secchezza e dell'irritazione oculare causati da un ridotto flusso lacrimale.

COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL, grazie alle proprietà muco-adesive del Carbomer, riduce i sintomi derivati dall'instabilità del film lacrimale.

COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL è indicato per le persone che manifestano sensazione di secchezza, affaticamento o fastidio agli occhi provocati da fenomeni irritativi (polvere, aria condizionata, vento, fumo, uso prolungato di videoterminali).

COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL è un gel trasparente viscoso che fuoriesce dal contenitore sotto forma di gocce.

Indicazioni per l'uso

Lavarsi le mani. Svitare il tappo del tubo. Inclinare il capo all'indietro e guardare verso l'alto. Abbassare delicatamente con le dita di una mano la palpebra inferiore dell'occhio per formare una tasca. Tenere con l'altra mano il tubo in posizione verticale per favorire la formazione di una piccola goccia. Instillare la goccia in un occhio senza toccarlo con l'estremità del tubo e pulire delicatamente l'eccesso di prodotto dal contorno dell'occhio. Tenere chiuso l'occhio per 1-2 minuti. Avvitare il tappo del tubo, prestando attenzione a non far toccare il tubo con qualsiasi altra superficie (compresi occhi o dita). Instillare una goccia nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì, ovvero secondo necessità.

Avvertenze

Il prodotto è solo per uso oftalmico.

L'uso di COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL è controindicato nel caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti.

Il prodotto non deve essere utilizzato con le lenti a contatto. Dopo aver instillato COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL attendere almeno 30 minuti prima di applicare di nuovo le lenti a contatto.

Qualora si necessiti di concomitanti trattamenti oculari, attendere circa 10 minuti e comunque lasciare COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL come ultimo trattamento da utilizzare.

Dopo l'instillazione del prodotto si potrebbe avvertire un bruciore temporaneo, secrezione palpebrale e visione offuscata. Assicurarsi pertanto di vedere chiaramente prima di guidare, usare macchinari o fare altri lavori che potrebbero essere pericolosi se non si è in grado di vedere correttamente.

Precauzioni

- Il periodo di validità è riferito al prodotto integro e correttamente conservato.
- Non utilizzare se il contenitore appare danneggiato.
- Il prodotto non deve essere usato oltre i 28 giorni dopo la prima apertura del contenitore.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Composizione

Carbomer 0,2%; Cetrimide, Sorbitolo; Idrossido di Sodio; Sodio Edetato; acqua distillata.

CONFEZIONE: Tubo da 10g

Data ultima revisione dei testi: luglio 2020.

Dispositivo medico CE 0546



Dompé farmaceutici S.p.A. - Via San Martino, 12 - 20122 Milano